



Klarity®

CLARAMENTE TU MEJOR OPCION

CATALOGO

Baja-temperatura

Materiales de termoplásticos para entablillados

Los materiales de entablillados Klarity ofrecen una completa gama de hojas de termoplásticos para todas las necesidades de entablillado.

Un principiante o un profesional pueden hacer férulas perfectas, simplemente eligiendo el material correcto.

Como usar los materiales para entablillado Klarity.

Todos los materiales para entablillado Klarity son termoplásticos de baja temperatura. Las hojas pueden ser fácilmente suavizadas colocándolas en un baño de agua caliente (65°C -70°C) durante tres minutos o menos, dependiendo del espesor de la hoja.

Posteriormente se pueden cortar y moldear a cualquier forma deseada. Las férulas se endurecen en 5 minutos o menos a temperatura ambiente. Las hojas están cubiertas para prevenir una repentina autoadhesión, pero pueden ser retiradas fácilmente con calor.

Tipo	Artículo	Características	Aplicaciones	
Elástica	Klarity®	Memoria elástica	Una completa gama de Aplicaciones	P1
	Klarity Pro™	Conformabilidad Moderada Control moderado Alta rigidez	Grandes y pequeñas tablillas Férulas para espasticidad	P3
Plástico	Klarity KB	Alta conformabilidad	Entablillados de extremidades Superiores	P4
	Contour Pro	Control bajo moderado Alta rigidez	pequeñas férulas férulas dinámicas Equipos de adaptación	P4
Plástico/ Caucho	Klarity KS™	Alta conformabilidad	Extremidades superiores	P5
		Control moderado Rigidez máxima	E inferiores Entibación de fracturas Grandes férulas que cubren todo el cuerpo	
Plástico/ Caucho	Contour Colors™	Control moderado	Extremidades superiores e inferiores	P6
	Contour Blend	Rigidez moderada	Grandes y pequeñas férulas	P7
		Conformabilidad Moderada	Una completa gama de aplicaciones	
Como-Caucho	Easy fit™	Conformabilidad Moderada Alto control	Extremidades superiores e inferiores Entibación de fractura de las extremidades superiores	P7
		Moderada rigidez	Grandes férulas que cubren todo el cuerpo	

Claramente Tu Mejor Opción

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

KLARITY®

Como el Aquaplast™ Klarity® se hace transparente cuando se calienta y fuerte cuando se enfría. Klarity® desafía las huellas dactilares ya que se enfría dejando un bello acabado y suave. Klarity® está recubierto, para evitar el borrado accidental de la unión, pero puede ser fácilmente soldado por si mismo presionando y frotando dos superficies juntas y sujetándolas.

Klarity® resiste estiramiento no deseado y tiene una excelente memoria elástica, simplemente recalentar y remodelar todas las veces que quiera.

La manipulación no es ningún problema, lo mejor es calentar en un baño de agua a temperatura de 65°C-70°C (150°F -160°F)

Disponibles una variedad de tamaños, colores y patrones de perforación.



Colores: Blanco, Azul, Rosa, Violeta, Negro

Grosor: 3.2mm (1/8"), 2.4mm (3/32"), 1.6 (1/16")

Dimensiones: 920x610mm (24"x36") o 460x610mm (18"x24")

Perforaciones: Múltiples opciones

Características: Memoria elástica, moderada confortabilidad, control moderado, alta rigidez.

Aplicaciones: Una gama completa de aplicaciones para grandes y pequeñas entablillados


KLARITY WHITE™

P-3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
P-3200A	460X610X3.2mm	No perforado	4pzas/caja
P-3201	920x610x3.2mm	perforado (1%)	5pzas/caja
P-3201A	460x610X3.2mm	Perforado (1%)	4pzas/caja
P-3205	920x610x3.2mm	Perforado (5%)	5pzas/caja
P-3205A	460x3610x3.2mm	Perforado (5%)	4pzas/caja
P-3219A	460x610x3.2mm	Perforado Profesional (19%)	4pzas/caja

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

P-3242	920X610X3.2mm	Perforado Extra Grande (42%)	5pzas/caja
P-3242A	460x610x3.2mm	Perforado Extra Grande (42%)	4pzas/caja
P-2400	920x610x2.4mm	No Perforado	5pzas/caja
P-2400A	460x610x2.4mm	No perforado	4pzas/caja
P-2412	920x610x2.4mm	Perforado (12%)	5pzas/caja
P-2412A	460x610x2.4mm	Perforado (12%)	4pzas/caja
P-2436	920x610x2.4mm	Perforado Extra Grande (36%)	5pzas/caja
P-2436A	460x610x2.4mm	Perforado Extra Grande (36%)	4pzas/caja
P-1600	920x610x1.6mm	No Perforado	5pzas/caja
P-1600A	460x610x1.6mm	No Perforado	4pzas/caja
P-1612	920x610x1.6mm	Perforado (12%)	5pza/caja
P-1612A	460x610x1.6mm	Perforado (12%)	4pzas/caja
P-1636	920x610x1.6mm	Perforado Extra Grande	5pzas/caja
P-1636A	460x610x1.6mm	Perforado Extra Grande	4pzas/caja

Guía de perforación	Guía de espesor
Suave	1/8" _____ 3.2 mm
Perforado. 1%	3/32" _____ 2.4mm
Perforado 5%	1/16" _____ 1.6mm
Perforado 12%	
Perforado 19 %	
Perforado 36%	
Perforado 42%	

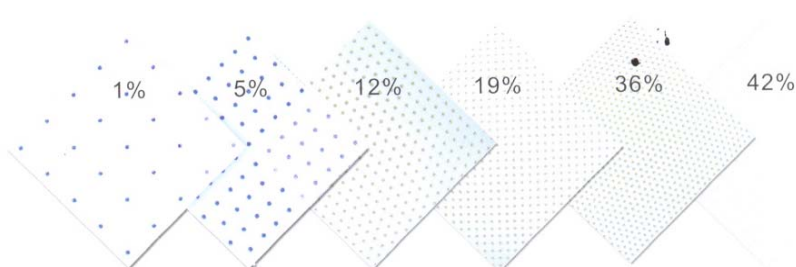

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

KLARUTY BLUE™

PB-3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
PB-3219A	460x610x3.2mm	Perforado Prof. (19%)	4pzas/caja
PB-2400A	460x610x2.4mm	No Perforado	4pzas/caja
PB-2412A	460x610x2.4mm	Perforado (12%)	4pzas/caja
PB-1600A	460x610x1.6mm	No Perforado	4pzas/caja
PB-1612A	460x610x1.6mm	Perforado (12%)	4pzas/caja



KLARITY VIOLET™

PV-3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
PV-3219A	460x610x3.2mm	Perforado (19%)	4pzas/caja
PV-2400A	460x610x2.4mm	No Perforado	4pzas/caja
PV-2412A	460x610x2.4mm	Perforado (12%)	4pzas/caja
PV-160A	460x610x1.6mm	No Perforado	4pzas/caja
PV-1612A	460x610x1.6mm	Perforado (12%)	4pzas/caja

KLARITY BLACK™

PC-3200A	460x610x3.2mm	No perforado	4pzas/caja
PC-3219A	460x610x3.2mm	Perforado Profesional (19%)	4pzas/caja
PC-2400A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
PC-2412A	460x610x2.4mm	Perforado (12%)	4pzas/caja
PC-1600A	460x610x1.6mm	No perforado	4pzas/caja
PC-1612A	460x610x1.60mm	Perforado (12%)	4pzas/caja

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

KLARITY PINK™

PP-3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
PP-3219A	460x610x3.2mm	Perforado Prof. (19%)	4pzas/caja
PP-2400A	460x610x2.4mm	No perforado	4pzas/caja
PP-2412A	460x610x2.4mm	Perforado (12%)	4pzas/caja
PP-1600A	460x610x1.6mm	No Perforado	4pzas/caja
PP-1612A	460x610x1.6mm	Perforado (12%)	4pzas/caja



Guía de perforación
Suave
Perforado 12%
Perforado 19 %

Guía de espesor
1/8" _____ 3.2 mm
3/32" _____ 2.4mm
1/16" _____ 1.6mm



ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

KLARITY PRO™



Como ORFIT™, KLARITY PRO™ se hacen transparente cuando se calientan y súper fuerte cuando se enfrían. *KLARITY PRO™ desafía las huellas dactilares ya que se enfría dejando un bello y suave acabado.* KLARITY PRO™ está recubierto, para evitar el borrado accidental de la unión, pero puede ser fácilmente soldado por si mismo sujetando y presionando las dos superficies juntas. KLARITY PRO™ resiste estiramiento no deseado y tiene un excelente memoria elástica, simplemente recalentar y se volverá a formar todas las veces que se requiera. La manipulación no es ningún problema lo mejor es calentar en un baño de agua caliente a temperatura entre 65°C a 70°C.

Colores: Beige.

Grosor: 3.2mm (1/8".), 2.4mm (3/32"), 2.0mm (1/12"), 1.6 mm (1/16").

Dimensiones: 920x610mm (24"x36") o 460x610mm (18"x24".)

Perforaciones: Múltiples opciones.

Características: Memoria elástica, conformabilidad moderada, control moderado, alta rigidez.

Aplicaciones: Una gama completa de aplicaciones para grandes y pequeños entablilladas.

KLARITY PRO™

PS-3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
PS-3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
PS-3201	920x610x3.2mm	Perforado (1%)	5pzas/caja
PS-3201A	460x610x3.2mm	Perforado (1%)	4pzas/caja
PS-2400	920x610x2.4mm	No perforado	5pzas/caja
PS-2400A	460x610x2.4mm	No perforado	4pzas/caja
PS-2412	920x610x2.4mm	Perforado (12%)	5pzas/caja


PS-2412A	460x610x2.4mm	Perforado (12%)	4pzas/caja
PS-2000	920x610x2.0mm	No Perforado	5pzas/caja
PS-2000A	460x610x2.0mm	No Perforado	4pzas/caja
PS-2012	920x610x2.0mm	Perforado (12%)	5pzas/caja
PS-2012A	460x610x2.0mm	Perforado (1%)	4pzas/caja
PS-1600	920x610x1.6mm	No perforado	5pzas/caja
PS-1600A	460x610x1.6mm	No perforado	4pzas/caja
PS-1612	920x610x1.6mm	Perforado (12%)	5pzas/caja
PS-1612A	460x610x1.6mm	Perforado (12%)	4pzas/caja

Guía de perforación	Guía de espesor	
Suave	1/8" _____ 3.2 mm	
	3/32" _____ 2.4mm	
Perforado 1%	1/16" _____ 1.6mm	
Perforado 12 %	1/16" _____ 1.6"mm	



ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

KLARITY KB™

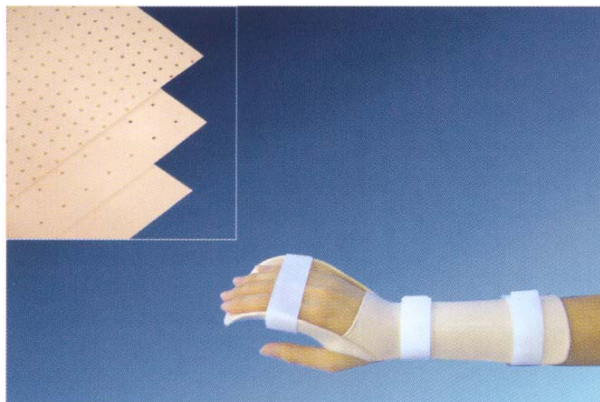

Nuestro material de entablillado mas versátil. KB™ es una mezcla de plástico y caucho que crea una goma suave. Altamente confortable y de rápido ajuste, KB™ crea férulas rígidas fácil y rápidamente. Menor elasticidad y fácil caída hace que las férulas se puedan formar con un mínimo esfuerzo. KB™ están recubiertas para evitar el borrado accidental de la unión libre, pero puede ser fácil soldarla a si misma presionando y frotando dos superficies juntas.

Ideal para una amplia gama de aplicaciones incluyendo trabajos detallados.

Colores: Beige oscuro

Grosor: 3.2mm (1/8")

Dimensiones: 920x610mm (24"x36") o 460x16mm (18"x24")

Perforaciones: Hoja sencilla o molde de 1%

Características: Alta conformabilidad, control moderado, moderada rigidez.


Aplicaciones: Múltiples incluyendo las pequeñas férulas de trabajo detallado.

KLARITY KB™ (Beige oscuro)

KBS-3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
KBS-3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
KBS-3201	920x610x3.2mm	Perforado (1%)	5pzas/caja
KBS-3201A	460x610x3.2mm	Perforado (1%)	4pzas/caja

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

CONTOUR PRO™

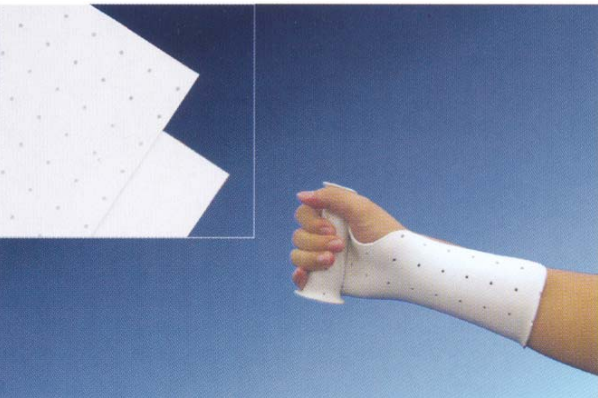

Para profesionales experimentados en entablillado los cuales requieren un alto de conformabilidad y finos detalles, CONTOUR PRO™ es perfecto. Rápida colocación y extremadamente moldeable, CONTOUR PRO™ es de material plástico, especialmente diseñado para hacer dinámico el entablillado, equipo de adaptación, y férulas pequeñas que requieren rigidez extra. Mejor al calentar en un baño de agua a (65°C – 70°C).

Colores: Oston

Grosor: 3.2mm (1"8"). o 2.4mm (3"/32")

Dimensiones: 920x610mm (24x36in.) o 460x610mm (18x24in)

Perforaciones: Hoja sencilla o molde de 1%

Características: alta conformabilidad, control bajo, alta rigidez.

Aplicaciones: Para entablillar las extremidades superiores y pequeños entablillados.

CONTOUR PRO™ (Oston)

CP-3200	920x610x3.2mm	No perforado	5pzas/caja
CP-3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
CP-3201	920x610x3.2mm	Perforado (1%)	5pzas/caja
CP-3101A	460x610x3.2mm	Perforado (1%)	4pzas/caja
CP-2400A	460X610X3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
CP-2401A	460x610x2.4mm	Perforado (1%)	4pzas/caja

Guía de perforación

Suaves
Perforado 1%

Guía de espesor

1/8" 3.2 mm

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

KLARITY KS™ Y KS2™



Nuestro material mas rígido para entablillado, KS™ tiene una excelente resistencia y fácil maleabilidad. Formulado para mas de rigidez y durabilidad (férulas que no se rompen o se agrietan después de usarlas) KS™ ofrece un alto grado de control y resistencia al estirarse... adecuado para una variedad de aplicaciones, sobre todo cuando son necesarios mayor resistencia y rigidez. Disponible recubierto (KS2) o no recubierto (KS) para facilitar la libre unión.



Colores: Blanco

Grosor: 3.2mm (1/8")

Dimensiones: 920x610mm (24"x36") o 460x610mm (18"x24")

Perforaciones: hoja sencilla o molde de 1%

Características: Alta conformabilidad, control moderado, máxima rigidez.

Aplicaciones: Múltiples, incluidas las grandes férulas y chaquetas del cuerpo.

KLARITY KS™ (Blanco, no recubierto)


KS-3200	920x610x3.2mm 5pzas/caja	No Perforado
KS-3200A	460x610x3.2mm 4pzas/caja	No Perforado
KS-3201	920x610x3.2mm 5pzas/caja	Perforado (1%)
KS-3201A	460x610x3.2mm 4pzas/caja	Perforado (1%)

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

KLARITY KS2™ (Blanco Perforado)


KS2-3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
KS2-3200A	460x610x3.2mm 4pzas/caja	No Perforado	
KS2-3201	920x610x3.2mm 5pzas/caja	Perforado (1%)	
KS2-3201A	460x610x3.2mm 4pzas/caja	Perforado (1%)	

Guía de perforación	Guía de espesor
Suaves	1/8" _____ 3.2mm
Perforado 1%	3/32" _____ 2.4mm

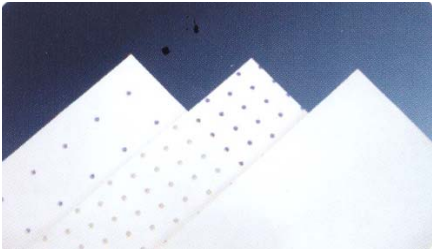

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

COUNTOUR COLORS™

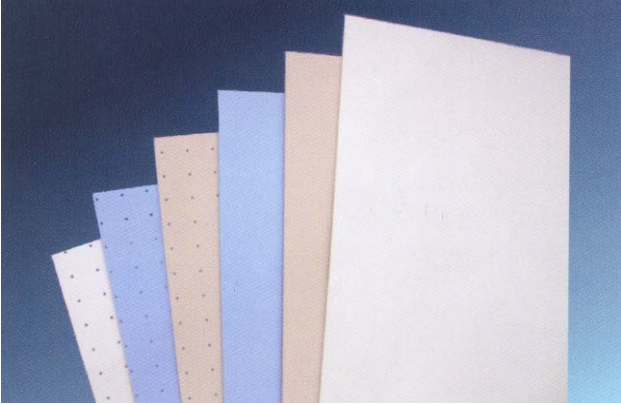

Similar al Contour Blend™ pero con mayor contenido de goma y mas resistencia al estiramiento, Contour Colors™ son ideales para una gama de tipos de férula, grandes y pequeños.

Contour Colors™ sin marcas de huellas digitales y crean entablillados con un suave y sedoso acabado. Las férulas tienen moderada la memoria y pueden recalentarse sin perder la forma. Contour Colors™ están recubiertos para evitar el borrado accidental de la unión, pero el revestimiento puede ser fácilmente removidos para una fuerte union permanente.

Color: Beige, azul y blanco

Grosor: 3.2mm (1"/8"), (2.4mm (3"/32"))

Dimensiones: 920x610mm (24"x36") o 460x610mm (18"x24")

Perforaciones: Hoja sencilla o molde de 1%

Características: Alta conformabilidad, moderado control, rigidez moderada

Aplicaciones: Múltiples, incluidas las grandes férulas y chaquetas del cuerpo.

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

Contour Colors™ (Beige/blue/white)



CONTOUR BEIGE™

CBR - 3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
CBR - 3200A	460x610x3.2mm	No perforado	4pzas/caja
CBR - 3201	920x610x3.2mm	Perforado (1%)	5pzas/caja
CBR - 3201A	X460X610X3.2MM	Perforado (1%)	4pzas/caja

CONTOUR BLUE™

CBL - 3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
CBL - 3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
CBL - 3201A	920x610x3.2mm	Perforado	5pzas/caja
CBL - 3201A	460x610x3.2mm	Perforado	4pzas/caja

CONTOUR WHITE™

CBW - 3200	920x610x3.2mm	No Perforado	5pzas/caja
CBW - 3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
CBW - 3201A	920x610x3.2mm	Perforado (1%)	5pzas/caja
CBW - 3201A	460x610x3.2mm	Perforado	4pzas/caja

Guía de perforación

Suaves
Perforado 1%

Guía de espesor

1/8" _____ 3.2 mm



ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

COUTOUR BLEND™



Contour Blend™ es un material muy versátil, es rápido y confortable. Es una mezcla de caucho y plástico, se ofrecen para férulas que pueden ser rápidas y fácilmente fabricadas, incluso por un terapeuta novato. Moderada elasticidad y fácil caída; significa que las férulas pueden formarse con mínimo esfuerzo. Contour blend™ esta recubierta para evitar el borrado accidental de la unión, pero puede ser soldada fácilmente a si misma, presionando y frotando las dos superficies juntas. Ideal para una amplia gama de aplicaciones.

Color: Beige

Grosor: 3.2mm (1"/8") o 2.4mm (3"/32")

Dimensiones: 920x610mm (24"x36") o 460x610mm (18"x24")

Perforaciones: Hoja sencilla o molde de 1%

Características: Alta conformabilidad, moderado control, rigidez moderada.


Aplicaciones: Una gama amplia de aplicaciones para grandes y pequeños entablillados

CONTOUR BLEND™ (BEIGE)

CB-3200	920x610x3.2mm	No perforado	5pzas/caja
CB-3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
CB-3201	920x610x3.2mm	Perforado (1%)	5pzas/caja
CB-3201A	460x610x3.2mm	Perforado (1%)	4pzas/caja
CB-2400A	460x610x2.4mm	No Perforado	4pzas/caja
CB-2401A	460x610x2.4mm	Perforado (1%)	4pzas/caja

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

EASY FIT™

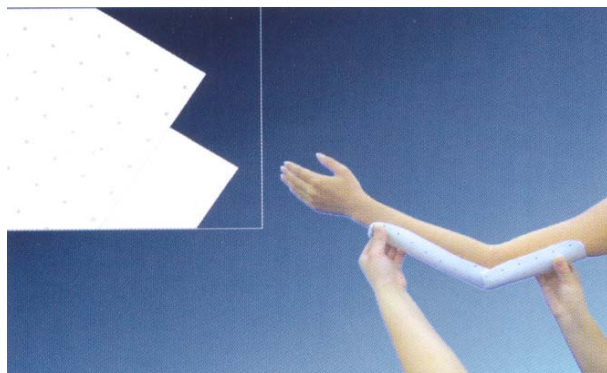

EASY FIT™ es excepcionalmente fuerte y duradero, para una amplia de aplicaciones de entablillado, incluidas las grandes férulas. EASY FIT™ es altamente resistente al estirar, pero con excelente caída y conformabilidad. Ligeramente viscoso cuando se caliente, EASY FIT™ va a permanecer en los lugares difíciles para los contornos de los diseños cuidadosos, es ideal para clientes que no están en condiciones de cooperar. EASY FIT™ las férulas tendrán una excelente rigidez y un buen auto sellado de los bordes. EASY FIT™ no esta recubierta y puede fácilmente soldarse a si mismo por presión y frotamiento de dos superficies juntas.

Color: Blanco

Grosor: 3.2mm (1"/8") o 2.4mm (3"/32")

Dimensiones: 920x610mm (24"x36") o 460x610mm /18"x24")

Perforaciones: Hoja sencilla o molde de 1%

Características: alto control, rigidez moderada.

Aplicaciones: Múltiples incluyendo las grandes férulas

EASY FIT™ (BLANCO)

EZ-3200	920x610x3.2mm	No perforado	5pzas/caja
EZ-3200A	460x610x3.2mm	No Perforado	4pzas/caja
EZ-3201	920x610x3.2mm	Perforado (1%)	5pzas/caja
EZ-3201A	460x610x3.2mm	Perforado (1%)	4pzas/caja
EZ-2400A	460x610x2.4mm	No Perforado	4pzas/caja
EZ-2401A	460x610x2.4mm	Perforado (1%)	4pzas/caja

Guía de perforación

Suave
Perforado 1%

Guía de espesor

1/8" _____ 3.2 mm
3/32" _____ 2.4mm



ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

ENTABLILLADOS: FERULAS PRECORTADAS

2.4mm KLARITY WHITE™
(Sólido)
A200-2400P



Férula de soporte para el pulgar

3.2mm COUNTOUR BLEND™
(Sólido)
A200-3200CB

El corte CMC constituye un fuerte y ligero apoyo para la muñeca y articulaciones del pulgar, al tiempo que permite libre movimiento de muñeca para mejorar la función. CMC es ideal para la artritis y lesiones del ligamento. Paquete de 3.

3.2mm CONTOUR PRO™		
(Sólido)	(Perforado 1%)	
A201-320KBS	A201-3201CPS	CHICO
A201-3200CPM	A201-3201CPM	MEDIANO
A201-3200CPL	A201-3201CPL	GRANDE



Férula para muñeca

3.2mm KLARITY KB™ BEIGE		
(Sólido)	(Perforado 1%)	
A201-3200KBS	A201-3201KBS	CHICO
A201-3200KBM	A201-3201KBM	MEDIANO
A201-3200KBL	A201-3201KBL	GRANDE

La línea extensa ulnar, proporciona apoyo al antebrazo cuando las férulas son dorsales o volar. Se utiliza como base para la férula dinámica del dedo de la mano para fijación. Soportes de la muñeca para una gran variedad de condiciones médicas. Paquete de 3

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

ENTABLILLADOS: FERULAS PRECORTADAS

3.2mm CONTOUR PRO™

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A202-3200CPS	A202-3201CPS	Chico
A202-3200CPM	A202-3201CPM	Mediano
A202-3200CPL	A202-3201CPL	Grande



Férula para muñeca con
agujero en el pulgar

3.2mm KLARITY BLANCO™

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A202-3200PS	A202-3201PS	Chico
A202-3200PM	A202-3201PM	Mediano
A202-3200PL	A202-3201PL	Grande

Férulas de muñeca con forma ovalada para facilidad de montaje. Puede ser utilizado para un entablillado dinámico. Paquete de 3

3.2mm EASY FIT™

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A204-3200ESZ	A204-3201ESZ	Chico
A204-3200EZM	A204-3201EZM	Mediano
A204-3200EZL	A204-3201EZL	Grande



Férula para muñeca y
pulgar con vendaje en espica

3.2mm KLARITY WHITE™

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A204-3200PS	A204-3201PS	Chico
A204-3200PM	A204-3201PM	Mediano
A204-3200PL	A204-3201PL	Grande

Inmoviliza la muñeca y el pulgar, las articulaciones CMP y MP. Ideal para el tratamiento de tenosinovitis, de Quervain's y los problemas del pulgar. El diseño para el pulgar permite una mayor facilidad de posiciones y hechuras. Paquete de 3.

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

ENTABLILLADOS: FERULAS PRECORTADAS

3.2mm KLARITY WHITE™

(Sólidos)	(Perforado 1%)	
A206-3200PS	A206-3201PS	Chico
A206-3200PM	A206-3201PM	Mediano
A206-3200PL	A206-3201PL	Grande



Férula basada en el radial del pulgar con vendaje en espica

3.2mm CONTOUR BLEND™

(Sólidos)	(Perforado 1%)	
A206-3200CBS	A206-3201CBS	Chico
A206-3200CBM	A206-3201CBM	Mediano
A206-3200CBL	A206-3201CBL	Grande

Colocar el radial de la mitad de la mano y el brazo, dejando la línea del anular en la mano libre. Ideal para condiciones inflamatorias, como la de Quervain's, tenosinovitis, o después de la reconstrucción de la articulación MP o CMC. Paquete de 3.

3.2mm CONTOUR BLEND™

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A218-3200CBS	A218-3201KBS	Chico
A218-3200CMB	A218-3201CBM	Mediano
A218-3200CBL	A218-3201CBL	Grande



Férula para fractura de metacarpiano

3.2mm KLARITY™ KB BLEND

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A218-3200KBS	A218-3201KBS	Chico
A218-3200KBM	A218-3201KBM	Mediano
A218-3200KBL	A218-3201KBL	Grande

Utilizar para proteger las fracturas de 4º y 5º metacarpiano, usados cuando el apoyo es todavía necesario, se puede recortar ajustadamente según sea necesario. Paquete de 3.

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

ENTABLILLADOS: FERULAS PRECORTADAS

2.4 mm KLARITY WHITE TM

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A210-2400PS	A210-2412PS	Chico
A210-2400PM	A210-2412PM	Mediano
A210-2400PL	A210-2412PL	Grande



Férula para pulgar en forma de guante

3.2mm COUNTOR BLEND TM

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A210-3200CBS	210-3201CBS	Chico
A210-3200CBM	210-3201CBM	Mediano
A210-3200CBL	210-3201CBL	Grande

Guante de férula pulgar: diseñado para inmovilizar el pulgar y el apoyo de las articulaciones CMC y CP. Utilizar para tratar la artritis, tenosinovitis del pulgar. Paquete de 3

3.2mm KLARITY KB TM BEIGE

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A212-3200KBS	A212-3201KBS	Chico
A212-3200KBM	A212-3201KBM	Mediano
A212-3200KBL	A212-3201KBL	Grande



Férula para descanso en forma de guante deportivo

3.2mm KLARITY WHITE TM

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A212-3200PS	A212-3201PS	Chico
A212-3200PM	A212-3201PM	Mediano
A212-3200PL	A212-3201PL	Grande


Utilizar para proteger fracturas de 4º y 5º metacarpiano, utilizados cuando el apoyo es todavía necesario, se pueden recortar ajustadamente según sea necesario. Paquete de 3.

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

ENTABLILLADOS: FERULAS PRECORTADAS

3.2mm EASY FIT™

(Sólidos)	(Perforado 1%)	
A213-3200EVS	A213-3201EVS	Chico
A213-3200EZM	A213-3201EZM	Mediano
A213-3200EZL	A213-3201EZL	Grande

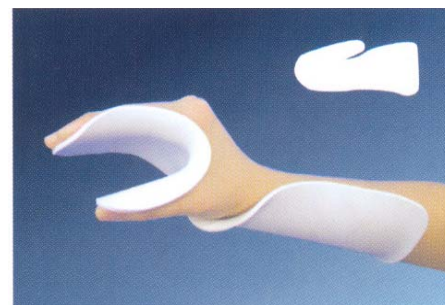

Férula para posición descanso

3.2mm KLARITY KB™ BEIGE

(Sólidos)	(Perforado 1%)	
A213-3200KBS	A213-3201KBS	Chico
A213-3200KBM	A213-3201KBM	Mediano
A213-3200KBL	A213-3201-KBL	Grande

Soportes para la mano en posición funcional para ayudar a mantener el arco en la palma y evitar contracturas. La posición del pulgar en aducción palmar con leve oposición. Ideal para las posiciones de la noche, para hemiplejía o alteraciones neurológicas. Puede ser utilizado durante la fase aguda de una lesión para la protección y la comodidad de las heridas de mano o muñeca. Generosamente cortada para dar cabida a un antebrazo flácido. Paquete de 3

3.2 mm KLARITY WHITE™

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A214-3200PS	A214-3201PS	Chico
A214-3200PM	A214-3201PM	Mediano
A214-3200PL	A214-3201PL	Grande



Férula dorsal hasta el antebrazo

3.2mm KLARITY KB™ BEIGE

(Sólido)	(Perforado 1%)	
A214-3200KBS	A214-3201KBS	Chico
A214-3200KBM	A214-3201KBM	Mediano
A214-3200KBL	A214-3201KBL	Grande

Permite la palma para tareas funcionales. Indicado para trauma acumulativo, o para inmovilizar la muñeca. Base ideal para entablillado dinámico. Paquete de 3.

ENTABLILLADO: TERMOPLASTICO

ENTABLILLADOS: FERULAS PRECORTADAS

3.2mm	KLARITY KS TM	
(Sólido)	(Perforado 1%)	
A203-3200KSS	A203-3201KSS	Chico
A203-3200KSM	A203-3201KSM	Mediano
A203-3200KSL	A203-3201KSL	Grande


Ayuda a controlar la caída del pie durante la ambulación. Se fija en cuestión de minutos, es menos costosa que la ortesis de alta temperatura. Elimina la presión sobre el talón. Este producto, al igual que otros de férulas de pre corte en blanco, se cortan planas y debe ser fijadas por un profesional médico.



Férula AFO de pre corte

ENTABLILLADOS ESPECIALES

KL301- AFO MOVIL

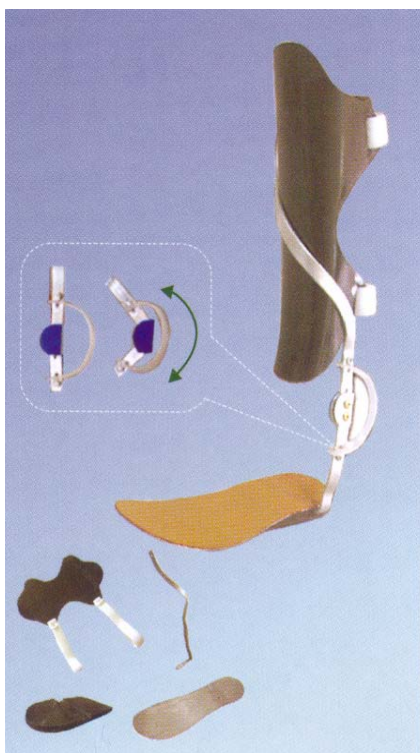

Promueve el caminado normal

La infraestructura es de alto grado de acero inoxidable. Estables articulaciones de doble eje con mecanismo. Los resortes de acción promueven el movimiento del pie. Se ajusta a la mayoría de calzado.

Cómodo ajuste

Plástico termo formado ligero que se ajusta al contorno corporal

Fiable y Estable

Acero de alta calidad de peso ligero de acero inoxidable 3 soportes de larga duración.

Natural movimiento cinético

Único de doble eje con mecanismo articulado, el sostiene constante movimiento, con coordinación del tobillo para mejorar la recuperación del andar a pie.

Versátil y sensible

El resorte de acción promueve la coordinación del tobillo con el pie

Diseño abierto con terminado de cómoda piel. Se ajusta a la mayoría de calzado.

KL302- CORSE PARA FRACTURA DE TIBIA

Promueve la curación, caminando antes!

Klarity KB™ ventilado es un molde, promueve incluso la curación a través de la presión circunferencial. El ensamblado modular ofrece un montaje rápido y un sencillo ajuste.

Formas Ajustadas

El KLARITY KB™ rígido es un molde que se ajusta al contorno de las extremidades.

Ventilado y no es alérgico a la piel.

Estable y fiable

Apoyos termoplásticos fuertes de alta temperatura.

Configura fácilmente a la forma y posiciones.

Listos para el uso de correas y hebilla para facilitar el montaje.

Ajustar la tensión deseada para promover la curación.

Versátil y sensible

Refuerza el con una articulación flexible que no obstruye el caminar. Se ajusta a la mayoría de calzado.



ENTABLILLADOS ESPECIALES

FERULAS PREFORMADAS

Ahorre tiempo y dinero con Férulas preformada. Estas están listas para su uso y se puede modificar fácilmente con una pistola de calor o por inmersión en agua caliente 65°C-70°C, (150-160°F) durante un minuto. Las Férulas incluyen; ganchos y cintas diseñadas, disponible en hojas sólidas y perforadas. La medición es tomada a través de las articulaciones de las falanges y del metacarpiano.



Férula de descanso para mano



Férula para posición funcional

Izquierda	Derecha	Tamaño
A401-1KSO	A401-2KSO	Chico hasta 3.5"
A401-3KSO	A401-4KSO	Mediano a 3.5"
A401-5KSO	A401-6KSO	Grande hasta 4"

Izquierda	Derecha	Tamaño
A402-1KSO	A402-2KSO	Chico hasta 3.5"
A402-3KSO	A402-4KSO	Mediano a 3.5"
A402-5KSO	A402-6KSO	Grande hasta 4"



Férula para posición neutral



Férula de cono para espasticidad

Izquierda	Derecha	Tamaño
A403-1KSO	A403-2KSO	Chico hasta 3.5"
A403-3KSO	A403-4KSO	Mediano a 3.5"
A403-5KSO	A403-6KSO	Grande hasta 4"

Izquierda	Derecha	Tamaño
A404-1KSO	A405-2KSO	Chico hasta 3.5"
A404-3KSO	A405-4KSO	Mediano a 3.5"
A404-5KSO	A405-6KSO	Grande hasta 4"

ENTABLILLADOS ESPECIALES

FERULAS PREFORMADAS



Férula de Balón Anti-Espasticidad

Izquierda	Derecha	Tamaño
A405-1KSO	A404-2KSO	Chico hasta 3.5"
A405-3KSO	A404-4KSO	Mediano a 3.5"
A405-5KSO	A404-6KSO	Grande hasta 4"

FERULA DE PIE

Un entablillado KLARITY KS™ con cero flexión en el tobillo. Esta férula se puede modificar fácilmente mediante el uso de una pistola de calor o agua caliente. No es para la ambulación. Flejes adaptables para diversas configuraciones. El Ajuste está determinado por el número del zapato.

L301-KSL	Grande hasta 11.5" (29cm)
L301-KSS	chica hasta 10" (26cm)



HERRAMIENTAS



GANCHO Y CINTA

Gancho con pegamento posterior (25m)

FZ-2316AJ	Blanco	16mm
FZ-2320AJ	Blanco	20mm
FZ-2325AJ	Blanco	25mm
FZ-2338AJ	Blanco	38mm

Cinta con pegamento posterior (25mm)

FZ-2325BJ	Blanco	25mm
FZ-2338BJ	Blanco	38mm

Gancho (25m)

FZ-2325A	Blanco	25mm
FZ-2338A	Blanco	38mm

CINTA (25m)

FZ-2316B	Blanco	16mm
FZ-2320B	Blanco	20mm
FZ-2325B	Blanco	25mm
FZ-2338B	Blanco	38mm

